

1 Webブラウザを起動します。

2 アドレスバーにサーバのアドレスを入力し、
[Enter] を押します。




3 ユーザ&パスワードを入力します。

4  をクリックします。

5 目的のフォルダをクリックします。

6 閲覧したい画像のサムネイルをクリックすると、
別の画面で詳細画像が表示されます。

7 画像閲覧を終了する場合は、右上の×で
画面を閉じてください。

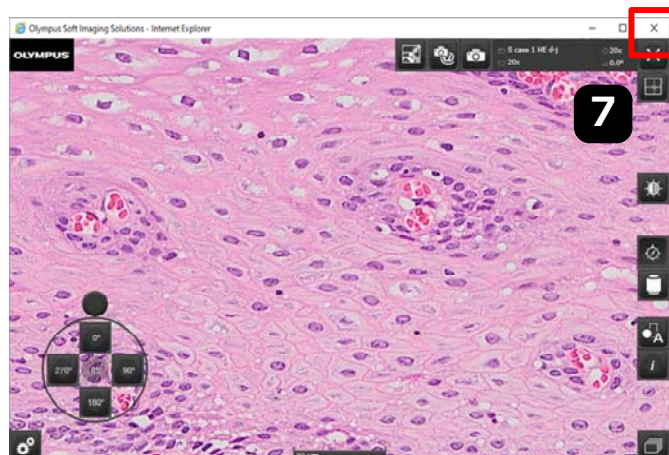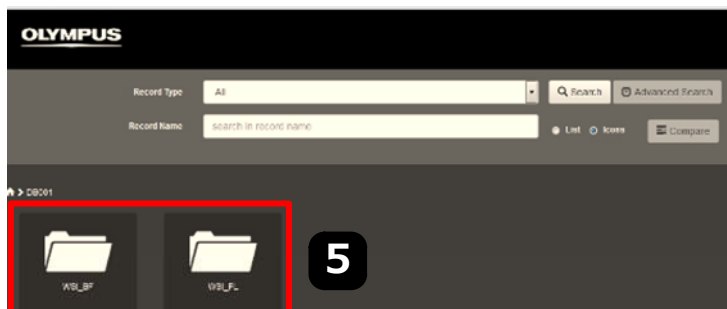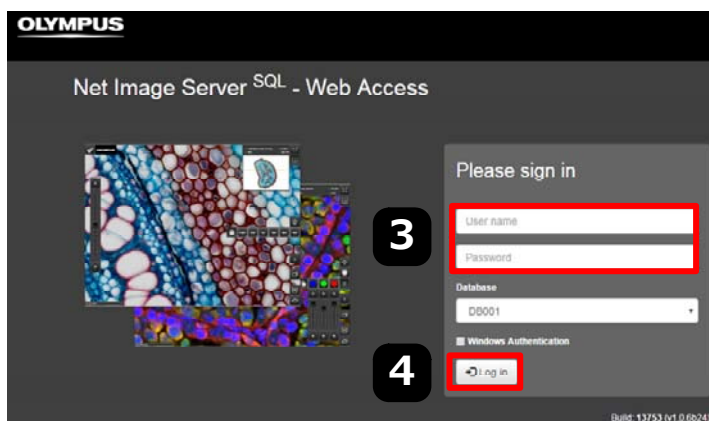

各種機能の説明



観察している部分をキャプチャし、保存することが可能です。



閲覧画像のハイパーリンク情報を得ることができ、さらにE-mailなどでそのまま送信し、受信側で同じ画像の同じ場所を手軽に閲覧することが可能になります。



画像の全画面表示の切り替えができます。
戻る際は、Escキーか、画面内をダブルクリックしてください。



画像の明るさ調整ができます。



画像回転ボタンの表示ON/OFFができます。



画像の倍率変更ができます。マウスのスクロール機能でも拡大縮小が可能です。



画像情報を表示します。




複数のレイヤ画像がある場合は、ここで切り替えます。



画像の回転をすることができます。



アノテーション機能で、画像の簡易計測もできます。

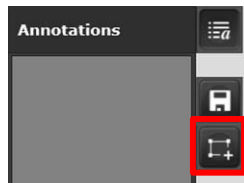

目的の計測機能をクリックします



Text Input

permission: Everyone

name: Line

author: undefined

cancel create

内容はそのまま Create をクリックし、計測します。



<計測結果を削除する場合>

